


2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Device (Colloidal Gold)



- Okamžitý výsledek za 15 minut
- Vysoká specifita a přesnost
- Snadné použití a ovládání

2019-nCoV IgG/IgM je rychlý test na kvalitativní detekci protilátek IgM / IgG proti N-proteinu koronavirov v plné lidské krvi, séru nebo plazmě. Je určen k použití profesionály jako screeningový test a jako pomůcka při diagnostice infekce virem 2019-nCoV.

Změna hladin protilátek IgM/IgG:

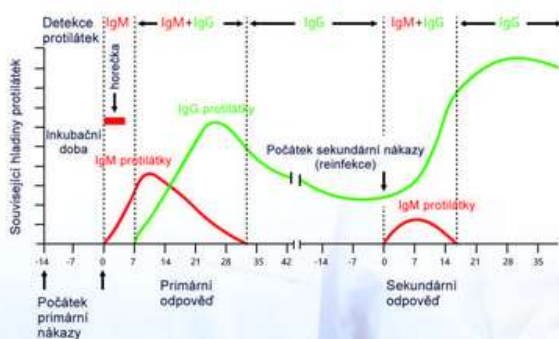

Jako první po infekci virem se objevují protilátky IgM a následně ve střední a pozdní fázi infekce se objevují i protilátky IgG

Test na IgM/IgG protilátky může určit, zda se pacient „nedávno infikoval virem 2019-nCoV“

Postup zkoušky:

1a. Z plné krve

Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch. Natáhněte do pipety vzorek venózní či kapilární krve. Kápněte 2 kapky vzorku krve do jamky na testovací kazetě a poté přidejte 1 kapku bufferu.

1b. Z plazmy/séra

Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch. Natáhněte do pipety vzorek plazmy/séra.

Kapněte 1 kapku vzorku do jamky na testovací kazetě a poté přidejte 1 kapku bufferu.

2. Nastavte si čas. Přečtěte výsledek testu za 15 minut. Pozor, výsledky odečtené až po 20 a více minutách nemusí být přesné.

Pro vzorek plné krve



Pro vzorek plazma/sérum




nebo




Počkejte 15 min. Odečtěte výsledek

Interpretace výsledků:

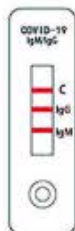


IgG pozitivní
IgM pozitivní

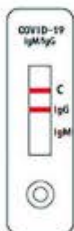


IgG pozitivní
IgM negativní




IgG negativní
IgM pozitivní

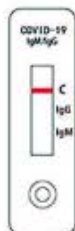


IgG negativní
IgM negativní

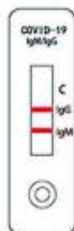

neplatné

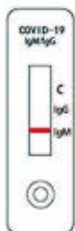

neplatné

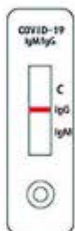

neplatné



neplatné