



RESPIRÁTOR FFP2 NR

Model BM-002

InSpe, Savanoriu ave. 178F,
Vilnius, Lithuania

Návod k použití k ochrannému respirátoru FFP2 NR

Popis: Filtrační polomaska FFP2 (non-medical), skládaná,
EN 149:2001 + A1:2009, COVID-19 PPE-R/02,075-V2

Materiál: Netkaná textilie, melt-blown textilie,

Záruční doba: 2 roky

Podmínky skladování:

Teplota mezi -20° C až 40° C, relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Mělo by být zaručeno, že produkty ve skladu a při přepravě budou nepoškozené, neznečištěné, neovlivněné vlhkostí. Věnujte pozornost protipožární ochraně, odolnosti proti dešti, kyselinám, zásadám, vyhýbejte se umístění na světle.

Oznámený subjekt: Polski Rejestr Statków S.A. - CE 1463

INSTRUKCE



Návod k použití:

Před použitím nového respirátoru je třeba si umýt ruce. Ověřte si, jestli je maska neporušená. **1)** Otevřete skládací masku. **2)** Ujistěte se, že měkká nosní lišta se nachází na horní straně. **3)** Nasadte si pásek na ucho. **4)** Upravte měkkou nosní lištu tak, aby obepínala nosní část. **5)** Ujistěte se, že můžete dobře dýchat a pokud je to nutné, upravte si masku.

Varování:

Tato maska s označením „NR“ je určena pouze k jednorázovému použití. Doporučená doba použití je 4 až 8 hodin. Tato maska pomáhá chránit proti určitým kontaminujícím částicím, ale zcela nevylučuje vystavení riziku nakažení chorobou či infekcí. Masku okamžitě vyměňte, pokud je dýchání obtížné, nebo pokud dojde k zvlhčení nebo poškození masky.